

## Слуховой аппарат АХОН-К88

Инструкция по применению



**!ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ КАК  
ВСТАВИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ  
В УХО ВЫКРУТИТЕ РЕГУЛЯТОР  
ГРОМКОСТИ В МИНИМАЛЬНОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ**

## Внешний вид и органы управления



**!ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ТОЛЬКО ПРИЛОЖЕННОЕ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

## Способ применения

1. Наденьте ушной вкладыш на слуховой аппарат, выкрутите регулятор громкости в минимальное положение, переведите регулятор ON/OFF в положение ON, плотно вставьте слуховой аппарат в ухо, регулятором громкости настройте уровень усиления, так чтобы слышать чистый звук.
2. Если Вы слышите свист, пожалуйста, убедитесь, что ушной вкладыш не порван, подходит по размеру и плотно сидит в ухе.
3. Пожалуйста, выключайте слуховой аппарат, когда перестаёте им пользоваться

## Содержание и уход

Если слуховой аппарат не работает проверьте следующее:

1. Аппарат выключен.
2. Батарея разряжена.

3. В отверстии наушника посторонний предмет.
4. Наушник сломан.

Звук очень тихий:

1. Положение регулятора громкости находится в минимальном положении.
2. Слабый заряд батареи.

## Примечания

1. Пожалуйста, не используйте слуховой аппарат на максимальной громкости долгое время – это может нанести урон вашему слуху.
2. Всегда проверяйте ушной вкладыш, отверстие наушника и отверстие микрофона, что бы они были чистыми без инородных объектов.
3. Корпус слухового аппарата влагоустойчив, его можно использовать во время дождя, но не подставляйте слуховой аппарат под струю воды и не топите в ёмкости с водой.. Не подвергайте открытым солнечным лучам.
4. Пожалуйста, используйте слуховой аппарат бережно и не подвергайте ударам.
5. Держите слуховой аппарат в недоступном для детей месте.